

### Wesentliche Merkmale:

- Andruckplatte mit dem Beutel fest verschweißt.
- ausreichende Länge des Schlauchbeutels auch bei stehend durchgeführter Irrigation
- durch geschlossene Beutelausführung
  - keine Spritzer nach außen
  - sehr geringe Geruchsbelästigung
- speziell für irrimed entwickelt, jedoch verwendbar für alle Irrigationssysteme

### Unsere Produktempfehlung:

# irrimed stoma



... für die perfekte Irrigation.

irrimed classic ist eine Entwicklung vom Stomaträger für Stomaträger.

## Combifix und Zubehör

Combifix  
Schlauchbeutel  
Inhalt: 30 Stück  
Best.-Nr.: 3000  
PZN: 04923090



Schlauchsystem bestehend aus Überleitungsschlauch (1,30 m) mit Rücklaufsperrung, **Irrigationskonus Gr. 1 für Combifix und enge Stomata**  
Best.-Nr.: 3100; PZN: 16764716

oder

Schlauchsystem bestehend aus Überleitungsschlauch (1,30 m) mit Rücklaufsperrung, **Irrigationskonus Gr. 2 für Combifix und normale bis große Stomata**  
Best.-Nr.: 3200; PZN: 16764722



Verschlussdeckel für Combifix  
Best.-Nr.: 3004  
PZN: 04923138

**Schaefers**  
Medizintechnik GbR  
Im Wiesengrund 13  
46342 Velen  
Tel. 02863 95024



## Combifix

der besondere Schlauchbeutel für Ihre Irrigation

 **Schaefers**  
**Medizintechnik GbR**

www.schaefers-medizintechnik.de  
info@schaefers-medizintechnik.de

## Fotogalerie – Combifix in der Anwendung



1. Konus wird in den Schnapping eingerastet



3. alte Versorgung wird entfernt



5. Verbindung zu Irrimed wird hergestellt



2. Gürtel wird eingerastet



4. Beutel wird angelegt



6. Konus entfernt nach erfolgreichem Wassereinfluss und Öffnung mit Deckel verschlossen