

Slangstelsysteem t.b.v *Irrimed*

REF: 25057K








Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een product van ons bedrijf

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg deze instructies voordat u *irrimed* gaat gebruiken. Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing altijd bij vragen over de bediening en voor het opsporen van storingen van uw *irrimed*. Als u verder nog vragen hebt, neem dan contact op met uw medisch speciaalzaak of met B. Braun Medical via homecare.nl@bbraun.com

Laat u voordat u het apparaat gaat gebruiken informeren over de medische veiligheid van de darmspoeling. Uw arts of stomaverpleegkundige adviseren u graag. Het spoelen moet worden aangeleerd onder deskundige begeleiding van een (stoma)verpleegkundige.


Veiligheidsinstructies, verklaring van de symbolen

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Markering van overeenstemming volgens de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG met het nummer van de afgeevende instantie. |  | Eenrichtingsventiel. De verbindingsslang bevat een terugstroomklep waardoor het water maar in één richting kan stromen |
|  | Voorzichtig |  | Fabricagedatum |
|  | Fabrikant |  | Distributor |
|  | Beschermen tegen blootstelling aan licht | | |

Product en gebruik

Het slangstelsysteem bestaat uit 2 onderdelen, de verbindingsslang (1,30 m) met geïntegreerde terugslagklep en de conus. De irrigatievloeistof (helder drinkwater) stroomt door dit slangstelsysteem van de *irrimed* in de darm van de patiënt.

Opgelet!


 Gebruik geen water met toevoegingen of medicijnen.

De twee onderdelen, de verbindingsslang en de conus, zijn verbonden met een Luer-Lock schroefverbinding. De schroefverbinding kan met een ¼ slag worden los- of dichtgedraaid.

Reiniging

Na de irrigatie moet de conus met warm water worden gereinigd. Om dit te doen, maakt u de Luer-Lock verbinding los met een ¼ slag naar links. Hierdoor kan de conus van de verbindingsslang worden losgekoppeld en gemakkelijk worden gereinigd.

Na de reiniging worden de conus en de verbindingsslang opnieuw met elkaar verbonden. Let hierbij op de juiste stroomrichting. **De conus moet aan de zwarte kant van het eenrichtingsventiel worden geschroefd (zie afbeelding op de achterkant).**

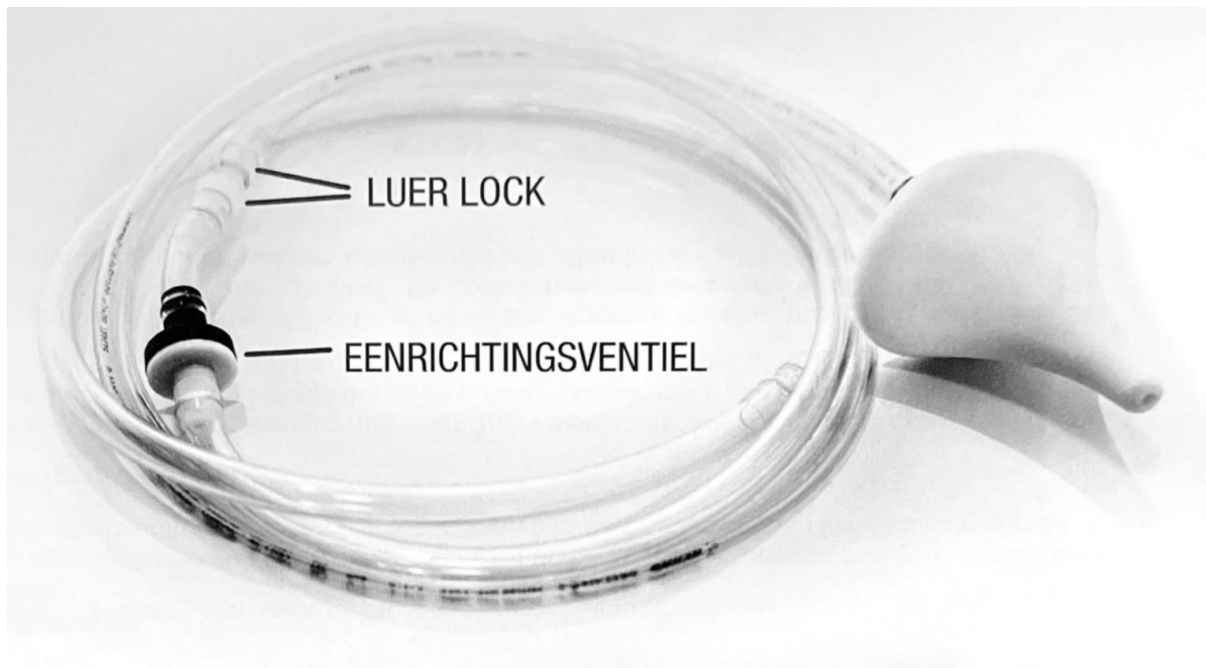

Verzorging en levensduur

Het slangstelsysteem is een wegwerpartikel wat kan verkleuren na verloop van tijd door een biofilm. Dit zijn geen schadelijke ziektekiemen, maar de normale bacteriën die in drinkwater voorkomen. Dit effect wordt doorgaans het eerst zichtbaar bij de verbindingsslang aan het aanzetstuk naar de *irrimed*. Om hygiënische redenen wordt geadviseerd het slangstelsysteem maandelijks, uiterlijk na 6 maanden, te vervangen. Als de biofilm zichtbaar is wordt reiniging aanbevolen.

Het slangstelsysteem is persoonsgebonden, dus voor 1 gebruiker.

Bestelinformatie

Slangstelsysteem voor darmspoeling

Bestelnr.: 25057K

Distributeur voor Nederland:

B. Braun Medical B.V.

Postbus 659

5340 AR OSS

Tel.: 0412-672 411

| Reserveonderdelen - Accessoires | Bestelnr.: |
|---------------------------------|------------|
| Irrimed | 25070KE |
| Snellader | 4003X |
| Slangstelsysteem (incl. Conus) | 25057K |